



1. Recommandations importantes en matière de sécurité

⚠ Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour les consulter ultérieurement.

Les avertissements renvoient à des instructions importantes en matière de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil. Les symboles et mots d'avertissement suivants indiquent l'importance des avertissements :

⚠ AVERTISSEMENT	Peut provoquer des blessures graves ou la mort.
⚠ MISE EN GARDE	Peut provoquer des blessures légères.
REMARQUES	Peut entraîner des dommages matériels (non liés à des blessures corporelles).
i Informations	Informations utiles ou importantes non relatives à la sécurité.

Respectez toujours les mesures de sécurité de base lors de l'utilisation d'un appareil électrique, en particulier en présence d'enfants. Veuillez conserver le produit hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution ou de brûlures graves :

- Ne laissez jamais le tire-lait sans surveillance lorsqu'il est branché à une prise électrique.
- Ne faites jamais fonctionner un appareil électrique dont le cordon ou la prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, a subi un choc, est endommagé ou tombé dans l'eau. Si vous constatez des dommages, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et appelez le service clientèle de Medela.
- N'utilisez pas un appareil électrique qui a été mouillé à l'eau ou à d'autres liquides, cest-à-dire :
 - N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.
 - N'immergez jamais l'appareil et ne laissez jamais tomber dans l'eau ou dans d'autres liquides.
 - Ne faites pas couler d'eau sur le tire-lait.
 - Ne touchez pas un appareil électrique qui a été exposé à l'eau ou à d'autres liquides. Si possible, débranchez l'appareil de la prise électrique, ouvrez-le et contactez le fabricant.

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter les risques sanitaires et réduire les risques de blessures graves :

- Ce dispositif est à usage personnel. L'utilisation du même appareil par plusieurs personnes présente des risques sanitaires et entraîne l'annulation de la garantie.
- N'utilisez pas le tire-lait en conduisant un véhicule.
- L'expression du lait peut provoquer des contractions. N'exprimez pas votre lait avant d'avoir accouché.
- Si vous tombez enceinte et que vous allaitez ou exprimez toujours votre lait, consultez un professionnel de santé avant de continuer à utiliser votre tire-lait.
- En cas d'infection de type Inpactin B, Inpactin C ou virus de l'immunodéficience humaine (VIH), l'expression du lait maternel ne réduit ou n'élimine pas le risque de transmission de virus ou bébé par le lait maternel.
- Lavez toutes les pièces qui entrent en contact avec le sein et le lait maternel après chaque utilisation.
- Si un enfant joue avec la tubulure, celle-ci présente un risque d'étranglement. Les enfants en bas âge risquent d'avaler de petites pièces.

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter les risques d'incendie ou de brûlures graves :

- Veillez à ce que la tension de l'adaptateur secteur soit compatible avec la source d'alimentation. Consultez le chapitre 8 pour connaître les caractéristiques techniques.
- Débranchez toujours les appareils électriques immédiatement après leur chargement.

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter les risques sanitaires et réduire les risques de blessures :

- Avant chaque utilisation, inspectez les composants individuels pour vérifier l'absence de fissures, d'éclats, de déchirures, de décoloration ou de détérioration. En cas d'endommagement de l'appareil, veuillez cesser de l'utiliser jusqu'à ce que les pièces aient été remplacées.
- Cet appareil ne peut être ni entretenu ni réparé. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne modifiez pas l'appareil.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé. Remplacez les pièces détachées usées ou usées.
- Utilisez le tire-lait uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas le tire-lait pendant votre sommeil ou en cas de somnolence.
- Si la tubulure présente de la moisissure, cessez de l'utiliser et remplacez-la.
- Ne rechargez pas le lait maternel ou micro-ondes et ne le faites pas bouillir. L'utilisation d'un micro-ondes ne réchauffe pas le lait de manière homogène et risque de provoquer de graves brûlures dans la bouche de bébé (l'usage du micro-ondes ou la mise en ébullition du lait maternel modifie également sa composition).
- Avant la première utilisation, nettoyez et désinfectez toutes les pièces qui entrent en contact avec votre sein et avec le lait maternel.

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter les risques d'incendie ou de brûlures graves :

- Ne placez pas et ne rangez pas cet appareil à un endroit où il risque de tomber dans l'eau.
- Le tire-lait et les accessoires ne sont pas hermétiquement étanches. Maintenez-les à distance d'alimentation, chaudières et des flammes nues.
- Ne pas utiliser près de matériaux inflammables.

⚠ MISE EN GARDE

Utilisez seulement les pièces recommandées par Medela avec votre tire-lait.

- Si l'expression est désagréable ou douloureuse, arrêtez l'appareil et insérez un doigt entre le sein et la tubulure pour les séparer. Retirez ensuite la tubulure du sein.
- Bien qu'un certain inconfort puisse être ressenti lors de votre première utilisation d'un tire-lait, l'utilisation du tire-lait ne doit pas être douloureuse. Si vous n'êtes pas certain de la taille de tétérelle qui vous convient, consultez le site www.medela.com ou contactez une conseillère en lactation ou un spécialiste en allaitement qui vous aidera à identifier la taille idéale.
- Contactez votre médecin traitant ou un spécialiste en allaitement si vous l'exprimez que très peu de lait, voire pas du tout, ou si l'expression est douloureuse. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 6.1.

REMARQUES

Manipulez les biberons de recueil et les pièces avec attention :

- Les biberons de recueil et les récipients en plastique peuvent être fragilisés par la congélation et risquent de casser en cas de chute.
- Les biberons de recueil et des pièces peuvent être endommagés à la suite d'une mauvaise manipulation (p. ex. chute ou renversement).
- N'utilisez pas le lait maternel si les biberons de recueil ou les composants semblent endommagés.

2. Usage prévu

Le tire-lait Freestyle™ Mini est destiné aux femmes allaitantes et qui souhaitent exprimer et recueillir leur lait. Le tire-lait Freestyle™ Mini est destiné à être utilisé dans un environnement domestique.

3. Description du produit


3.1 Description du tire-lait Freestyle™ Mini

Le tire-lait Freestyle™ Mini à usage personnel est équipé de la technologie « 2-Phase Expression™ » et offre la possibilité d'une expression simple ou double.

La durée de vie utile prévue des pièces lavables (tétérelle, connecteur et membrane, biberon et couvercle) est de six mois.

3.2 Votre tire-lait comprend :

- Tétérelle PersonalFit Flex, 24 mm**
1x pour tire-lait électrique simple
2x pour tire-lait électrique double
 - Tétérelle PersonalFit Flex, 21 mm**
2x pour tire-lait électrique double
 - Biberon de recueil**
1x pour tire-lait électrique simple
2x pour tire-lait électrique double
- *D'autres tailles de tétérelles, notamment 27 mm et 30 mm, ainsi que des inserts de 15 mm, 18 mm et 21 mm peuvent être achetés séparément.

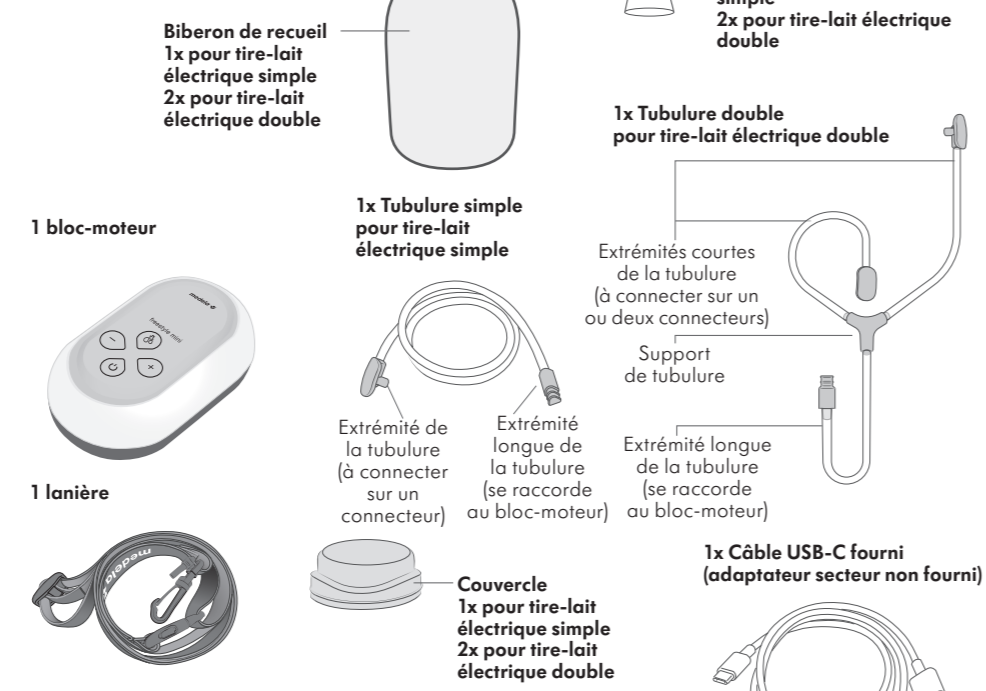

Photos non contractuelles.

4. Comment débuter

4.1 Premières étapes

Avant d'utiliser votre tire-lait pour la première fois et pour bien exprimer votre lait, il est important de :

- Retirez le clip de la lanière. Insérez la corde du clip dans le trou du tire-lait, puis enfoncez le clip dans la boucle. Rattachez le clip à la lanière.



- Chargez la batterie de votre tire-lait Freestyle™ Mini pendant trois heures : voir chapitre 4.3.
- Démontez toutes les pièces qui entrent en contact avec les seins ou le lait maternel avant de les nettoyer*.

4.2 Alimentation électrique de votre tire-lait

Sur batterie rechargeable

Avant la première utilisation, chargez la batterie du tire-lait pendant trois heures avec l'adaptateur secteur (non fourni).

→ L'affichage du niveau de batterie présente trois barres lorsqu'elle est chargée.

Pour plus de détails sur l'affichage du niveau de batterie, voir chapitre 8.2.

4.3 Charge de la batterie

⚠ AVERTISSEMENT

N'exposez pas le tire-lait ou sa batterie à des températures excessives.

i Informations

- Le tire-lait ne s'allumera pas pendant son chargement.
- Le plage de température ambiante adéquate pour charger la batterie est de 5 °C à 40 °C.

⚠ MISE EN GARDE

⚠ Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation. Ne rechargez pas la batterie pendant une période prolongée. Les batteries au lithium-ion ne peuvent être remplacées que par des prestataires de services agréés. Leur remplacement par un modèle de batterie inadapté peut entraîner un risque d'explosion. Éliminez les batteries usagées conformément aux lois et réglementations locales.

⚠ Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie se déchargera. Il doit être branché pour être réactivé. Après avoir branché l'alimentation, attendez dix minutes que l'écran s'allume, indiquant ainsi qu'il a été activé. Lorsque ensuite le produit branché jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. S'il n'est toujours pas activé, ou bout d'une demi-heure, veuillez consulter le service clientèle.

⚠ MISE EN GARDE

⚠ Utilisez exclusivement le câble USB-C fourni avec le tire-lait. Une source d'alimentation ou un câble USB-C inadéquats peuvent entraîner un risque d'incendie, d'électrocution ou de mauvais fonctionnement de l'équipement pour des raisons de surtension. La garantie n'est valable que si vous utilisez le câble USB-C Medela pour charger votre tire-lait.

⚠ Ne chargez jamais le tire-lait avec un câble d'alimentation USB endommagé.

⚠ Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez de la fumée ou une odeur de brûlé provenant du tire-lait ou de l'adaptateur secteur.

⚠ Le tire-lait ne peut pas être mis sous tension ou utilisé lorsqu'il est connecté au chargeur.

- Branchez le câble USB-C au bloc-moteur.
- Branchez le câble USB-C à un adaptateur secteur (non fourni).
- Branchez l'adaptateur secteur (non fourni) dans une prise murale.

5. Nettoyage

Avant d'utiliser votre tire-lait pour la première fois, il est important de : Démontez toutes les pièces et les nettoyer en suivant les instructions de nettoyage de votre tire-lait.

Accessoires nécessaires :

- Liquide vaisselle doux
- Goupillon souple et propre
- Bac propre pour laver les articles
- Eau potable
- Casserole propre pour faire bouillir de l'eau

Pièces à laver ou désinfecter :

- Tétérelle(s)
- Biberon(s) de recueil pour lait maternel
- Couvercle(s)
- Connecteur(s)
- Membrane(s)

REMARQUES

Démontez et lavez toutes les pièces en contact avec le lait maternel immédiatement après usage. Ce procédé aidera à enlever les résidus de lait maternel et évitera la prolifération de bactéries.

- Lavez-vous soigneusement les mains au savon et à l'eau.
- Utilisez uniquement de l'eau du robinet potable ou en bouteille pour le nettoyage.
- Ne placez pas les pièces du tire-lait directement dans l'évier pour les rincer ou les laver. Utilisez une bassine propre destinée uniquement aux produits de bébé.
- N'utilisez pas de chiffons pour essuyer les pièces du tire-lait.
- N'utilisez pas de désinfectants pour nettoyer.

Le tire-lait Freestyle™ Mini de Medela dispose d'un système fermé qui empêche le lait de pénétrer dans la tubulure lorsque le tire-lait est utilisé conformément aux instructions. **Ne nettoyez ou ne rincez jamais la tubulure.**

***Inspectez la tubulure avant utilisation. Si vous constatez la présence de condensation, de lait maternel et de moisissure dans la tubulure, cessez de l'utiliser et remplacez la tubulure.**

- N'utilisez pas le tire-lait lorsque la tubulure est mouillée, vous risquez de l'endommager.

Si vous remarquez un résidu blanc sur les collecteurs après les avoir placés dans l'eau bouillante, il se peut que votre eau ait une forte teneur en calcium. Éliminez les résidus en essuyant les pièces avec un chiffon propre et laissez-les sécher à l'air libre.

- Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée pour faire bouillir les pièces afin d'éviter toute accumulation de minéraux ou fil de fer susceptibles d'abîmer vos pièces.

⚠ MISE EN GARDE

REMARQUES

Prenez note des informations suivantes :

- Veillez à ne pas endommager les collecteurs lors du nettoyage.
- Rangez les collecteurs une fois secs dans un sac/une boîte propre jusqu'à l'utilisation suivante.
- Ne rangez pas les pièces lorsqu'elles sont mouillées ou humides, car cela favorise le développement de moisissures.

5.1 Présentation du processus de nettoyage

Le lavage et l'aseptisation sont deux procédés différents. Ils doivent être réalisés séparément pour vous protéger ainsi que votre bébé, et pour assurer l'efficacité de votre tire-lait.

Lavage – Pour nettoyer la surface des pièces en éliminant physiquement les résidus de lait et autres contaminants éventuels.

Désinfection – Pour réduire efficacement la quantité de microbes pouvant être présents sur les pièces lavées.

	Tétérelles	Connecteurs et membranes	Bouteilles et couvercles
Quand nettoyer			
Avant une première utilisation	Désassemblez les pièces comme présenté au chapitre 5.2	Lavez les pièces comme présenté au chapitre 5.3	Désinfectez les pièces comme présenté au chapitre 5.4
Après chaque utilisation	Désassemblez les pièces comme présenté au chapitre 5.2	Lavez les pièces comme présenté au chapitre 5.3	Désinfectez les pièces comme présenté au chapitre 5.2
Une fois par jour après utilisation	Désassemblez les pièces comme présenté au chapitre 5.2	Lavez les pièces comme présenté au chapitre 5.3	Désinfectez les pièces comme présenté au chapitre 5.4

	Tubulure	Bloc-moteur
Quand nettoyer		
Au besoin	Ne nettoyez ou ne rincez jamais la tubulure.	Essuyez avec un linge propre et humide. Reportez-vous au chapitre 5.5.

5.2 Démontage

Avant une première utilisation

Retirez et jetez l'enveloppe de protection* de la tétérelle.

Après chaque utilisation

Démontez l'ensemble-accessoires pour tire-lait en pièces distinctes (tétérelle, connecteur et bouteille) comme suit :

Retirez la tétérelle du connecteur.

Ouvrez la capsule arrière du connecteur en pinçant les deux rabats et en faisant basculer la capsule vers le haut.

Retirez la membrane du corps du connecteur. Séparez les biberons de recueil et les couvercles.

⚠ MISE EN GARDE

⚠ Ne vaporisez pas et ne versez pas de liquide directement sur le tire-lait.

⚠ Lorsque vous nettoyez le bloc-moteur, utilisez uniquement un linge doux et humide avec un liquide vaisselle doux. Les autres produits nettoyants ou les linges abrasifs peuvent affecter le fonctionnement de l'écran.

5.3 Nettoyage

Le lavage est primordial pour l'hygiène et consiste à laver les surfaces des pièces en éliminant physiquement les contaminants. Lavez les pièces à la main ou au lave-vaisselle.

Nettoyage et rinçage à la main (avant la première utilisation et après chaque utilisation)

ou

Nettoyage au lave-vaisselle (une fois par jour maximum)

Ne placez pas les pièces directement dans l'évier de la cuisine pour les laver ou les rincer. Utilisez une bassine dédiée au nettoyage des produits de bébé.

- Rincez les pièces démontées, sauf la tubulure, à l'eau claire, potable et froide (env. 20 °C).
- Nettoyez abondamment ces pièces à l'eau savonneuse et chaude (environ 30 °C). Utilisez un liquide vaisselle disponible dans le commerce et un goupillon propre.
- Rincez les pièces à l'eau claire, potable et froide pendant 10 à 15 secondes (env. 20 °C).
- Laissez sécher complètement après le nettoyage.

i Informations

Si vous utilisez le lave-vaisselle, les pièces peuvent se décolorer. Ce phénomène n'a aucune conséquence sur le fonctionnement des pièces. Ne lavez pas systématiquement la tubulure.

Séchage

- Laissez sécher à l'air libre sur un linge propre ou sur un essuie-tout.

Pour le modèle électrique simple

Pour le modèle électrique double

5.4 Désinfection

La désinfection est primordiale pour l'hygiène et consiste à éliminer les organismes vivants, comme les bactéries ou les virus. Faites bouillir les pièces sur la plaque de cuisson ou utilisez les sacs pour micro-ondes Quick Clean.

Désinfectez sur la cuisinière (avant la première utilisation et une fois par jour après utilisation)

10 min

ou

Désinfectez au micro-ondes (une fois par jour après utilisation)

- Recouvrez d'eau toutes les pièces démontées et lavées, à l'exception de la tubulure, et portez à ébullition pendant au moins 10 minutes. Veillez à ce que les pièces ne soient pas en contact direct avec le fond de la casserole.
- Laissez sécher après la désinfection.

2. Laissez sécher après la désinfection.

1. Utilisez les sachets Quick Clean™ dans le four à micro-ondes conformément aux instructions présentes sur les sachets.

2. Laissez sécher après la désinfection.

* Consultez le site web ou les boutiques près de chez vous pour connaître la disponibilité dans votre pays.

5.5 Nettoyage du bloc-moteur

Accessoires nécessaires :

- Eau potable
- Liquide vaisselle doux
- Essuie-tout ou torchon propre

Pièces nécessaires :

- Bloc-moteur

REMARQUES

⚠ Ne vaporisez pas et ne versez pas de liquide directement sur le tire-lait.

⚠ Lorsque vous nettoyez le bloc-moteur, utilisez uniquement un linge doux et humide avec un liquide vaisselle doux. Les autres produits nettoyants ou les linges abrasifs peuvent affecter le fonctionnement de l'écran.

⚠ MISE EN GARDE

⚠ Utilisez exclusivement le câble USB-C fourni avec le tire-lait. Une source d'alimentation ou un câble USB-C inadéquats peuvent entraîner un risque d'incendie, d'électrocution ou de mauvais fonctionnement de l'équipement pour des raisons de surtension. La garantie n'est valable que si vous utilisez le câble USB-C Medela pour charger votre tire-lait.

⚠ Ne chargez jamais le tire-lait avec un câble d'alimentation USB endommagé.

⚠ Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez de la fumée ou une odeur de brûlé provenant du tire-lait ou de l'adaptateur secteur.

⚠ Le tire-lait ne peut pas être mis sous tension ou utilisé lorsqu'il est connecté au chargeur.

⚠ MISE EN GARDE

⚠ Utilisez exclusivement le câble USB-C fourni avec le tire-lait. Une source d'alimentation ou un câble USB-C inadéquats peuvent entraîner un risque d'incendie, d'électrocution ou de mauvais fonctionnement de l'équipement pour des raisons de surtension. La garantie n'est valable que si vous utilisez le câble USB-C Medela pour charger votre tire-lait.

⚠ Ne chargez jamais le tire-lait avec un câble d'alimentation USB endommagé.

⚠ Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez de la fumée ou une odeur de brûlé provenant du tire-lait ou de l'adaptateur secteur.

⚠ Le tire-lait ne peut pas être mis sous tension ou utilisé lorsqu'il est connecté au chargeur.

6. Taille de tétérelle

6.1 Choix de la taille de tétérelle adaptée

Veillez à utiliser la bonne taille de tétérelle. Cet élément est primordial pour l'efficacité de l'expression.



- Pour trouver la taille adaptée, mesurez le diamètre de votre mamelon.
 - Choisissez une tétérelle légèrement plus grande que votre mamelon.
- Pour plus d'informations sur les tailles des tétérelles, consultez le site www.medela.com.

7. Assemblage de votre tire-lait

Utilisez uniquement des pièces propres et sèches pour l'assemblage. Consultez le chapitre 5 pour le nettoyage.

7.1 Assemblage du set pour tire-lait

Utilisez uniquement des pièces propres et sèches pour l'assemblage. Consultez le chapitre 5 pour le nettoyage.

Pièces nécessaires :

- Tubulure
- Bloc-moteur
- Tétérelles
- Biberons de recueil pour lait maternel
- Couvercles
- Connecteurs
- Membranes

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter toute contamination de votre lait :

- Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher vos seins, le bloc-moteur et les pièces de l'ensemble-accessoires pour tire-lait.
- Séchez-vous les mains à l'aide d'un chiffon parfaitement propre ou d'un essuie-tout à usage unique.
- Évitez de toucher l'intérieur des biberons de recueil et des couvercles.

Pour vous assurer que votre tire-lait fonctionne correctement en toute sécurité :

- avant utilisation, vérifiez que les composants du set pour tire-lait ne présentent aucun signe d'usure ou d'endommagement. Remplacer si nécessaire.
- Veillez toujours à la propreté de toutes les pièces avant usage. Si elles sont sales, nettoyez-les conformément aux instructions du chapitre 5.
- Utilisez uniquement les pièces d'origine de Medela.

REMARQUES

Pour éviter d'endommager le tire-lait, tous les composants doivent être complètement secs avant l'utilisation.

Insérez soigneusement la membrane (jaune foncé) avec le rabat dans l'orifice du connecteur.

→ Assurez-vous que la membrane est positionnée de façon hermétique autour du bord du connecteur.

Refermez le couvercle du connecteur jusqu'à ce qu'il produise un clic.

Vissez le connecteur sur le biberon de recueil.

Poussez prudemment la tétérelle dans le corps du connecteur.

→ Choisissez la taille de tétérelle qui vous correspond le mieux. Pour définir la taille adéquate, consultez le chapitre 6.

Vous pouvez faire pivoter (360°) la tétérelle ovale afin de la placer dans la position la plus confortable pour vous.

Insérez l'extrémité de la tubulure dans l'orifice du couvercle du connecteur.

Insérez l'autre extrémité de la tubulure dans le bloc-moteur, aussi loin que possible.

7.2 Préparation pour une séance d'expression simple

- Pour le tire-lait électrique simple, insérez l'extrémité du tube simple dans le connecteur.
- Pour le tire-lait électrique double, insérez l'extrémité courte inutilisée du double tube dans le support de tube et l'autre extrémité du tube dans le connecteur.
- Placez la tétérelle sur le sein de sorte que le mamelon soit correctement centré dans l'embout.
- Maintenez la tétérelle et le connecteur sur votre sein à l'aide de votre pouce et de votre index. Soutenez votre sein avec la paume de votre main. Commencez à exprimer votre lait comme indiqué au chapitre 8.3.

7.3 Préparation pour une séance de double expression


Informations

- Une double expression permet de gagner du temps et accroît la valeur nutritionnelle du lait.

- Insérez les parties courtes de la tubulure dans les deux connecteurs.
→ Système assemblé correctement (pour la double expression).
- Placez les tétérelles sur les seins de sorte que le mamelon soit correctement centré dans l'embout.
- Maintenez les tétérelles et les connecteurs sur les seins à l'aide des pouces et des index. Soutenez les seins avec la paume des mains.
Commencez à exprimer votre lait comme indiqué au chapitre 8.3.

7.4 Comment porter votre tire-lait

Grâce à la lanière, le tire-lait peut être porté en bandoulière ou à la taille.

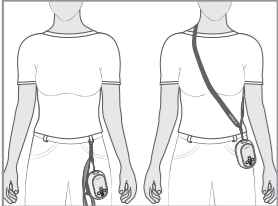


8. Fonctionnement de votre tire-lait

8.1 Vocabulaire et description

Technologie 2-Phase Expression™	Grâce aux recherches, Medela a constaté que les bébés têtent en 2 phases : stimulation et expression. Ces recherches sont la base sur laquelle s'appuie la technologie de tous les tire-lait Medela.
Phase de stimulation	Phase rapide afin de stimuler l'écoulement de lait.
phase d'expression	Phase plus lente pour une expression efficace et en douceur lorsque le lait commence à s'écouler.
Vide de confort maximal	Une puissance d'aspiration qui reste confortable. Différente pour chaque mère.
Éjection	Le réflexe qui lance le début de l'écoulement du lait.


8.2 Fonctionnement et affichage

Éléments de commande

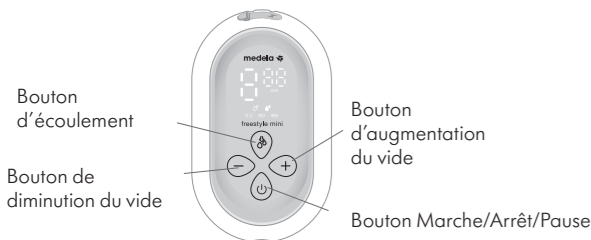

Guide d'utilisation :
Les éléments de commande et d'affichage ne sont pas toujours visibles. Lorsque le tire-lait est en marche, les éléments actifs s'allument.

Éléments affichés

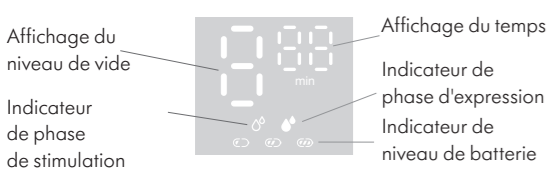

Affichage du fonctionnement et du niveau de charge de la batterie

	La charge de la batterie indique son état et son niveau de charge. → L'affichage des trois barres indique que la batterie est complètement chargée.
	Les barres disparaissent au fur et à mesure de la diminution de la capacité de la batterie. → Deux barres correspondent à environ 70 % de batterie restante. → Une barre correspond à environ 35 % de batterie restante.
	→ Lorsque la dernière barre du tire-lait clignote, cela indique que la batterie est presque vide. (clignotant)

8.3 Expression du lait maternel

MISE EN GARDE


- N'essayez pas d'exprimer votre lait avec un niveau d'aspiration excessif ou désagréable (douloureux). La douleur et les éventuelles blessures au mamelon ou au sein risquent de diminuer la production de lait.
- Contactez votre médecin traitant ou un spécialiste en allaitement si vous n'exprimez que très peu de lait, voire pas du tout, ou si l'expression est douloureuse.

REMARQUES


Veillez à ne pas plier ou pincer la tubulure pendant l'expression.



- Si ce n'est pas déjà fait, connectez votre tire-lait, une fois assemblé, à l'orifice de la tubulure à l'avant du tire-lait.
- Assurez-vous que le set pour tire-lait est connecté et correctement positionné.

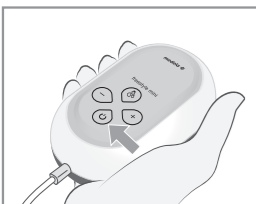

- Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt/Pause à l'avant jusqu'à ce que les voyants s'allument à l'écran, puis relâchez le bouton.
→ Le tire-lait démarre en phase de stimulation.

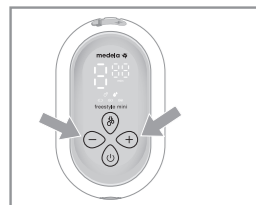

- Réglez le niveau de vide à l'aide des boutons Augmenter le niveau de vide (+) et Diminuer le niveau de vide (-) jusqu'à trouver le niveau confortable en phase de stimulation.



- Dès que le lait commence à s'écouler, appuyez sur le bouton d'écoulement pour passer en phase d'expression.

- Le tire-lait passe ensuite à la phase d'expression.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton d'écoulement au bout d'une minute, le tire-lait passera automatiquement en phase d'expression.



- Réglez le niveau de vide à l'aide des boutons Augmenter le niveau de vide (+) et Diminuer le niveau de vide (-) jusqu'à trouver votre niveau de vide maximal de confort en phase d'expression.


Trouver votre niveau de vide maximal de confort

La force d'aspiration maximale est le niveau de vide le plus élevé où l'expression est encore confortable.

- Une fois que vous êtes en phase d'expression, augmentez le niveau de vide à l'aide du bouton (+) jusqu'à ce que l'expression soit légèrement inconfortable (pas douloureuse).
- Ensuite, diminuez légèrement le niveau de vide en appuyant une fois sur le bouton (-).

Informations

- Le tire-lait n'est pas conçu pour être utilisé en position allongée ou pendant le sommeil. Cependant, vous pouvez vous pencher légèrement vers l'avant ou vers l'arrière pendant la séance d'expression.
- Le volume/capacité maximum du collecteur est de 150 ml. Lorsque cette limite est dépassée, transférez le lait dans un biberon de collecte avant de continuer à exprimer.

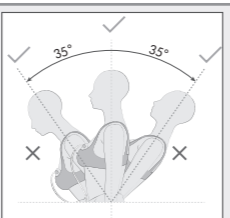

- À la fin de votre séance d'expression, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Pause pour arrêter la séance.
→ Sans intervention de l'utilisatrice, le tire-lait s'arrête automatiquement après 30 minutes. Le tire-lait s'éteindra automatiquement après 10 minutes de pause.



- Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt/Pause à l'avant pour éteindre le tire-lait.

Mise en pause

Le tire-lait peut être mis en pause pendant les phases de stimulation et d'expression.

Cette pause vous permet de vous réinstaller correctement, de récupérer vos biberons ou de vous occuper d'autre chose.

- Pour interrompre l'expression, appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt/Pause pendant que le tire-lait est en cours d'utilisation.
- Pour reprendre l'expression, appuyez brièvement à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt/Pause.

Si vous souhaitez démarrer une nouvelle séance d'expression, éteignez le tire-lait. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt/Pause pour le rallumer.

Informations

- Ce tire-lait s'éteindra automatiquement après 30 minutes de fonctionnement. Le tire-lait s'éteindra automatiquement après 10 minutes de pause.
- Pour poursuivre l'expression, vous aurez besoin de recommencer une nouvelle séance.
- Si vous devez marquer une pause supérieure à deux minutes, nous vous recommandons de reprendre en phase de stimulation.

9. Conservation et décongélation du lait maternel

9.1 Instructions de conservation

Consultez le site www.medela.com pour toute recommandation relative à la conservation et à la décongélation du lait maternel.

10. Maintenance et entretien

10.1 Entretien de la batterie

Ce dispositif contient une batterie non remplaçable. Lorsque la batterie est en fin de vie, le dispositif doit être mis au rebut conformément à la réglementation locale.

REMARQUES

L'appareil ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché à une source d'alimentation. Laissez la batterie se charger avant utilisation.

MISE EN GARDE

- Veillez utiliser le câble USB-C de chargement fourni avec ce produit. Ne branchez pas un câble USB-C d'un autre fabricant sur le moteur afin de ne pas l'endommager.
- Veillez utiliser un adaptateur ayant une tension d'entrée AC 100-240V et une tension de sortie DC 5V et 2,5 A.
- Né démontez pas, ne cognez pas, ne compressez pas et ne mettez pas l'appareil au feu. Certains composants des batteries au lithium-ion sont inflammables et nocifs, ce qui peut causer des blessures, un incendie, des fissures ou une explosion.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement à haute température.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si un gonflement important apparaît.
- Ne remplacez pas la batterie vous-même afin d'éviter surchauffe, incendie ou blessure corporelle.
- Ne retirez pas, n'ouvrez pas, ne dévissez pas et ne percez pas une batterie ou un bloc de batterie avec un objet métallique.
- Ne rechargez pas la batterie pendant une période prolongée. La batterie doit être retirée de l'appareil avant de le jeter.
- Les batteries au lithium-ion ne peuvent être remplacées que par notre entreprise ou des prestataires de services agréés. Il existe un risque d'explosion si vous remplacez les batteries par des modèles inadaptés. L'appareil doit être éteint lors du retrait de la batterie. Éliminez les batteries ou blocs de batteries usagés conformément à la réglementation environnementale nationale.

REMARQUES

Veillez à ne pas provoquer de court-circuit sur la prise USB-C ou la batterie du tire-lait avec des objets métalliques ou des liquides.

Informations

- Pour préserver la durée de vie de la batterie :
- Rangez votre tire-lait dans un endroit frais.
 - Rechargez la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée. Cela augmente la durée de vie de la batterie.
 - Chargez complètement la batterie avant de ranger votre tire-lait. Consultez le chapitre 8.2 pour en savoir plus sur le niveau de charge de la batterie.
 - Si votre tire-lait a été rangé dans un endroit chaud, il se peut que la batterie ne fonctionne pas tout de suite. Pour que la batterie fonctionne à nouveau normalement, laissez le tire-lait refroidir pendant une heure. Pendant ce temps, vous pouvez utiliser votre tire-lait en branchant l'adaptateur secteur à une prise.

Voyager à l'étranger

Informations

En déplacement, utilisez le câble USB-C fourni et connectez-le à une source d'alimentation USB correspondant à votre emplacement. Ce tire-lait est équipé d'une batterie lithium-ion. Certains pays peuvent limiter le transport de ce type de batterie en avion. Renseignez-vous sur le pays que vous visitez pour savoir s'il existe des restrictions de voyage liées aux batteries au lithium-ion. Veuillez noter que les performances de (nom du produit) peuvent être affectées par l'environnement extérieur, compte tenu de l'incertitude et de l'instabilité liées à l'environnement de voyage.

10.2 Stockage longue durée

Pour un stockage à long terme, conservez le tire-lait dans un endroit sec et frais.

Avant de ranger votre tire-lait pendant une période prolongée, pensez à :



- Nettoyez le set pour tire-lait et les biberons de recueil (voir le chapitre 5)
- Nettoyez le bloc-moteur (voir le chapitre 5.5)
- Vérifier que la batterie est chargée (voir ci-dessus)

Chargez complètement la batterie avant de ranger votre tire-lait pour une période prolongée. Consultez le chapitre 8.2 pour en savoir plus sur le niveau de charge de la batterie.

MISE EN GARDE

- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie se décharge. Il doit être branché pour être réactivé. Après avoir branché l'alimentation, attendez dix minutes que l'écran s'allume, indiquant ainsi qu'il a été activé.

11. Dépannage

En cas de fonctionnement inhabituel de votre tire-lait, vérifiez dans le tableau de dépannage si la situation est identifiée dans la colonne « Problème », puis suivez les instructions figurant dans la colonne « Solution ».

Tableau de dépannage

Problème	Solution
L'affichage ne s'allume pas après que j'ai appuyé sur le bouton Marche/Arrêt/Pause.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le tire-lait est branché sur une alimentation en bon état de fonctionnement.Si le problème persiste encore, contactez le service client de Medela.
Le décompte de la minuterie ne se lance pas après que j'ai appuyé sur le bouton Marche/Arrêt/Pause.	<ul style="list-style-type: none">Contactez le service client de Medela.
Le tire-lait ne génère pas de vide (le moteur ne fonctionne pas) après que j'ai appuyé sur le bouton Marche/Arrêt/Pause.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le tire-lait est en marche.Contactez le service client de Medela.
Le tire-lait génère uniquement un vide constant au lieu de cycles de vide	<ul style="list-style-type: none">Contactez le service client de Medela.
Le tire-lait s'arrête de fonctionner ou ne peut pas être allumé.	<ul style="list-style-type: none">Le tire-lait refuse de fonctionner, car la batterie est en surchauffe. Laissez le bloc-moteur refroidir, puis redémarrez le tire-lait.
L'aspiration est faible ou inexistante	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que tous les composants du set d'accessoires du tire-lait sont propres, secs et correctement raccordés.Assurez-vous que les membranes sont placées correctement dans les capsules de connecteurs et que les capsules de connecteurs sont bien fermées.Assurez-vous que du côté tire-lait, les tétérelles sont bien enfoncées dans les capsules de connecteurs.Lorsque vous exprimez votre lait, assurez-vous que la tétérelle est positionnée de façon hermétique sur le sein.Lors d'une expression simple, vérifiez que l'extrémité inutilisée de la tubulure est branchée correctement sur son support.Si la suction ne s'améliore pas, contactez le service clientèle de Medela.Contactez le service client de Medela.

Le tire-lait ne fonctionne pas comme d'habitude

- Débranchez la prise électrique du tire-lait et arrêtez-le.
- Séchez l'extérieur du tire-lait.

Le tire-lait a été immergé dans l'eau

- Débranchez la prise électrique du tire-lait et arrêtez-le.
- Contactez le service client de Medela.

Si le problème de votre tire-lait persiste ou si vous avez d'autres questions, contactez le service client de Medela. Pour obtenir les coordonnées, rendez-vous sur www.medela.com. Choisissez votre pays dans l'onglet « Contact ».

12. Garantie

L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'ouverture ou la modification de cet appareil annule la garantie.

Les informations relatives à la garantie internationale sont disponibles à l'adresse www.medela.com/ewarranty.

13. Mise au rebut

Mise au rebut de votre tire-lait

À la fin de sa vie utile, séparez toutes les pièces de votre tire-lait.

Les tétérelles, les coupelles externes et la tubulure sont en plastique. **Les membranes** sont en silicone. Ils peuvent faire l'objet d'une collecte séparée conformément aux systèmes locaux de collecte et de recyclage.

Le bloc-moteur, l'adaptateur d'alimentation (non fourni) et le câble USB-C (fourni) (équipement électronique)

peuvent contenir des substances dangereuses et ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. La batterie intégrée ne doit pas être enlevée et mise au rebut. En cas de fuite de la batterie, mettez le tire-lait au rebut. Les équipements électriques et électroniques (EEE) sont signalés par le symbole suivant :



Dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse, le fabricant ou son fournisseur doit récupérer les déchets d'EEE. D'autres pays peuvent avoir des systèmes de collecte et de recyclage similaires. Cet appareil contient des batteries qui ne sont pas remplaçables et ne doivent pas être retirées pour élimination.

REMARQUES

Éliminez l'équipement usagé conformément à la réglementation locale. Interrogez le point de vente ou les instances locales pour connaître les centres de collecte agréés des équipements usagés. La collecte en fil silenciel et le recyclage de votre équipement usagé préservent les ressources naturelles et garantissent son recyclage respectueux de la santé et de l'environnement.

14. Signification des symboles

Les tableaux suivants expliquent les symboles figurant sur les pièces des appareils et leur emballage.

	Indique le fabricant.		Indique le numéro de référence.
	Indique le numéro de série.		Indique le numéro de lot/paquet.
	Indique la date de fabrication.		Symbole d'alerte générale de sécurité, souligne des informations relatives à la sécurité.
	Tenir à l'abri de la pluie. Conserver dans un endroit sec.		Tenir à l'abri de la lumière du soleil.
	L'emballage contient des produits destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément au règlement (CE) N°1935/2004.		Indique que le contenu de l'emballage de transport est fragile et que l'emballage doit être manipulé avec précaution.
	Indique que l'emballage peut être recyclé.		Indique le matériau entrant dans la composition d'un article.
	Indique que les dispositifs électriques/électroniques ne peuvent pas être mis au rebut avec des déchets ménagers non triés (mise au rebut du dispositif conformément aux réglementations locales).		Indique la nécessité pour l'utilisatrice de consulter le mode d'emploi.
	Définit la plage d'humidité relative.		Définit la plage de température.
	Définit la plage de pression atmosphérique.		Indique le degré de protection contre la pénétration de corps étrangers et l'humidité.
	Indique un courant continu.		

Spécifique au pays

	Indique la conformité avec les exigences européennes applicables aux appareils électriques ménagers et autres appareils similaires.		Le marquage Regulatory Compliance Mark indique la conformité aux exigences australiennes relatives à la CEM et aux émissions radio.
	Indique que l'appareil a été évalué selon les normes de conformité au Royaume-Uni.		Indique que le produit dans l'emballage répond aux exigences de la norme GB606 et est destiné à être en contact direct avec de la nourriture.

15. Réglementation internationale

15.1 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Le tire-lait Freestyle™ Mini est conforme à toutes les exigences des normes et réglementations pertinentes en matière d'émissions électromagnétiques et d'immunité aux interférences.

AVERTISSEMENT

Le tire-lait Freestyle™ Mini ne doit pas être utilisé à proximité d'un autre appareil ou sur un autre appareil. Si vous devez l'utiliser à proximité d'un autre appareil, surveillez bien qu'il fonctionne normalement dans la configuration en question. Les appareils de communication sans fil, tels que les boîtiers de réseau sans fil domestiques, les téléphones mobiles, les téléphones sans fil et leur base, ainsi que les talkies-walkies peuvent interférer sur le fonctionnement du tire-lait électrique et doivent être placés à 30 cm de l'appareil ou moins.

16. Caractéristiques techniques

Résumé des spécifications techniques importantes

Pression atmosphérique nominale : 850HPa à 1060HPa ;
-60 à -290 mmHg, ±20 mmHg (-80 à -386 HPa, ±26 HPa)
45 à 111 cpm, ±5 cpm
(Double expression)

-65 à -255 mmHg, ±20 mmHg (-86 à -340 HPa, ±26 HPa)
45 à 111 cpm, ±5 cpm
(Expression simple)

Entrée	5 V ~ 2,5 A 12,5 W
Consommation électrique hors charge	Inférieure à 0,1 W
Bloc-moteur	
Autonomie et type de batterie	2200 mAh Lithium-ion,
Taille	113x68x42 mm, ±1 mm
Poids	205 g ±10g

	40°C	Plage de température de fonctionnement
	-5°C	5°C à 40°C
	80%	Plage d'humidité de fonctionnement
	20%	(20 % à 80 % d'humidité relative)
	1060 HPa	Plage de pression atmosphérique
	850 HPa	(850 HPa à 1060 HPa)
	+55°C	Température de transport/stockage
	-20°C	-20°C à 55°C
	80%	Plage d'humidité pour le transport/stockage
	20%	(20 % à 80 % d'humidité relative)

Matériaux en contact avec la peau ou le lait

- Tétérelle : polypropylène, élastomère thermoplastique
- Connecteur : polypropylène, silicone
- Biberon : polypropylène
- Couvercle : polypropylène
- Membrane : silicone

Medela Consumer AG
Lätlischstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medela.com
© Medela AG

International Sales
Medela AG
Lätlischstrasse 4b
6340 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
www.medela.com

Personne responsable/Importateur dans l'UE:
Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG
Georg-Kallmannsberger-Str. 2
85386 Eching, Germany
www.medela.com/support



MCAG Ref. IFU Freestyle Mini CL FR - 02CG/V1.0